



Anleitung zur Verwendung

1. Klappen Sie die Maske auf.
2. Positionieren Sie die Maske, so dass Mund und Nase bedeckt sind.
3. Passen Sie die Ohrschlaufen so an, dass die Maske bequem sitzt.
4. Drücken Sie die Maske vorsichtig an die Nase für einen dichten Sitz.
5. Um den Sitz zu überprüfen, legen Sie beide Hände über die Maske und atmen Sie kräftig aus. Wenn Luft um Ihre Nase strömt, drücken Sie den Clip fester. Wenn am Rand Luft austritt, positionieren Sie die Ohrschlaufen neu, um eine bessere Passform zu erzielen. Überprüfen Sie die Abdichtung erneut und wiederholen Sie den Vorgang, bis die Maske gut abdichtet.