

# Gebrauchsanweisung

## Atemschutzfaltmaske Aufsetzanleitung

### Vorbereitung:


1. Passende Atemschutz-Schutzklasse auswählen
2. Gebrauchsanweisung beachten
3. Auf Beschädigungen überprüfen
4. Haltbarkeit der Maske überprüfen

### Gebrauchsanweisung:

- Der Benutzer der Maske muss zur funktionsgerechten Handhabung unterwiesen werden.
- FFP/KN95 Masken schützen nicht gegen Gase und Dämpfe.
- Der Sauerstoffgehalt in der Atemluft muss min. 19,5 Vol.% betragen.
- Der Atemschutz darf nicht eingesetzt werden, wenn Konzentration, Art und Eigenschaft der Schadstoffe nicht bekannt sind.
- Die Maske ist sofort zu wechseln, wenn sie beschädigt ist oder der Atemwiderstand ansteigt. Nach dem Ende einer Arbeitsschicht ist die Maske grundsätzlich zu wechseln.
- Niemals Veränderungen an der Maske vornehmen.

### Das Anziehen der Atemschutzmaske:

1. Maske öffnen und Nasenclip mit einem Finger vorformen
2. Mit dem Kinn einsteigen, danach über die Nase ziehen
3. Seitliches Band hinterhalb der Ohren platzieren
4. Nasenclip mit beiden Zeigefingern anpassen
5. Dichtsitz der Maske prüfen – Bei Luftaustritt erneut anpassen

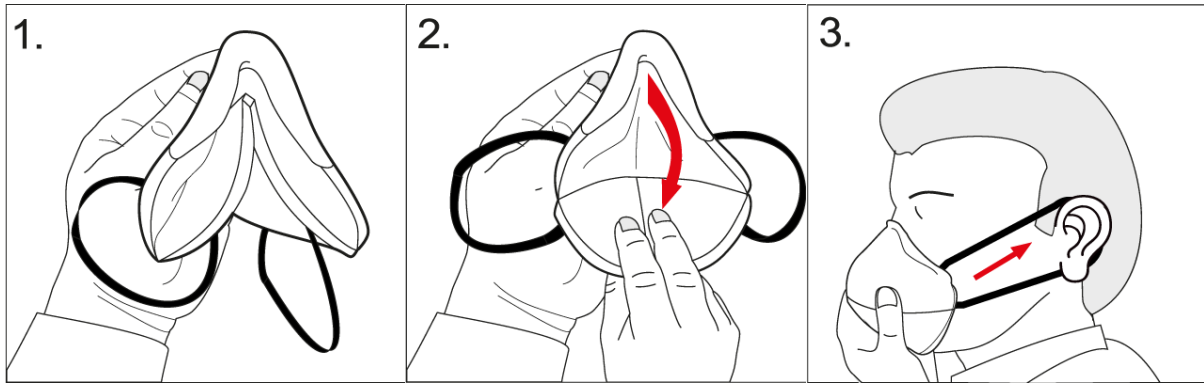

PRÜFUNG NACH: KN95 GB2626-2006

Mindesthaltbarkeitsdatum (Original verpackt): 3 Jahre ab Produktionsdatum

Art.Nr.: CH-KN95 CPA

Art.Nr.: CH-N95 CPA

Gemäß BGI/GUV-I 504-26 fallen sämtliche Formatic M. Masken in die Gruppe 1. Für Masken der Gruppe 1 ist eine G26-Vorsorgeuntersuchung nicht verpflichtend.

## Info

Wir helfen Ihnen gerne bei der Auswahl der richtigen Atemschutzmaske oder Anwenderschulungen. Bei Rückfragen, Beratungen und Info-Material nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.