



Filtrations Garantie
Getestet 50 Waschgänge

Schutzmaske Klassifizierung Typ II

Bedienungsanleitung

Haftungsausschluss

Um Ihre Gesundheit und die Gesundheit anderer zu schützen, ist es sehr wichtig, dass Sie diese Gebrauchsanweisung befolgen.

- Tragen Sie diese Maske, wenn Sie mit Menschen in Kontakt sind, die nicht Teil Ihres Haushalts sind.
- Prüfen Sie immer, ob die Maske richtig sitzt und Mund und Nase bedeckt.
- Achtung: Wenn Sie krank sind, ist diese Maske nicht geeignet. Fragen Sie Ihren Arzt um Rat.
- Diese Maske ist nicht zur Verwendung durch medizinisches Personal vorgesehen.
- Diese Maske ersetzt keine Hygieneschutzmaßnahmen (regelmäßiges Händewaschen, Abstand halten, Verringerung des Kontakts mit anderen Menschen). Sie stellt eine zusätzliche physische Barriere dar, die vor allem dann zum Tragen kommt, wenn Sie in engem Kontakt mit anderen Menschen stehen.



Wie wird diese Maske getragen?

Vor dem Aufsetzen:

1. Bevor Sie die Maske berühren, waschen Sie Ihre Hände mit Seife und Wasser oder einer hydro-alkoholischen Lösung.
2. Untersuchen Sie die Maske und stellen Sie sicher, dass keine Löcher, Risse oder Beschädigungen vorhanden sind.
3. Es wird empfohlen, die Maske direkt auf der Haut zu tragen.
4. Verändern Sie die Maske niemals in irgendeiner Weise.

Zum Aufsetzen:

1. Platzieren Sie die Naht auf der Rückseite.
2. Passen Sie die Maske so an, dass sie Nase, Mund und Kinn bedeckt.

Während dem Tragen:

1. Vermeiden Sie es, die Maske zu berühren und zu bewegen

Die Maske muss gewechselt werden:

1. Wenn Sie die Maske vier Stunden getragen haben.
2. Wenn Sie essen oder trinken möchten.
3. Wenn es schwierig wird, zu atmen.
4. Wenn die Maske befeuchtet wird.
5. Wenn die Maske beschädigt ist.
6. Wenn die Maske deformiert ist und nicht mehr richtig auf dem Gesicht sitzt.

Zum Absetzen:

1. Waschen Sie Ihre Hände mit Seife und Wasser oder einer hydro-alkoholischen Lösung.
2. Positionieren Sie Ihre Hände hinten an der Naht.
3. Isolieren Sie die Maske in einem Plastikbeutel, bis sie gewaschen wird.
4. Wenn die Maske deformiert oder abgenutzt ist, werfen Sie diese sofort in einen Mülleimer, der sich schließt.
5. Zum Schluss: Waschen Sie sich noch einmal die Hände mit Seife und Wasser oder einer hydroalkoholischen Lösung

